

# エセンタ™ 皮膚被膜剤ワイプ(シリコンベース)

## 1. 使用方法

- 本品は、排泄物や排泄物に含まれる酵素、並びに粘着剤によるダメージから皮膚を保護します。
- 皮膚を清拭し、しっかりと乾燥させてください。
- 個包装を開封し、シートを取り出して広げてください。
- 保護したい部位を本品で優しく拭き、数秒間待って乾燥させてください。

内容物：シロキサン共重合体

## 2. 注意

- 本品は必ず上記の説明に従って使用してください。
- 傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位(眼、口、耳、鼻、膣など)には使用しないでください。
- アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
- 本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

## 3. 警告

- 高温(40℃以上)および直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 火、熱、火花、静電気の発生源、電気メス等の熱源、発火源の近くで塗布しないでください。
- 換気のよい場所で塗布してください。
- 使用時は喫煙しないでください。
- ペットまたは子供の手の届かないところに保管してください。



高引火性

## 4. 輸入販売元 **コンバテック ジャパン株式会社**

お客様相談窓口 ☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>

RM-71775

423282